


Rücksendeanleitung für Amalgamabscheider-Behälter

medentex

The Experts in Dental Services

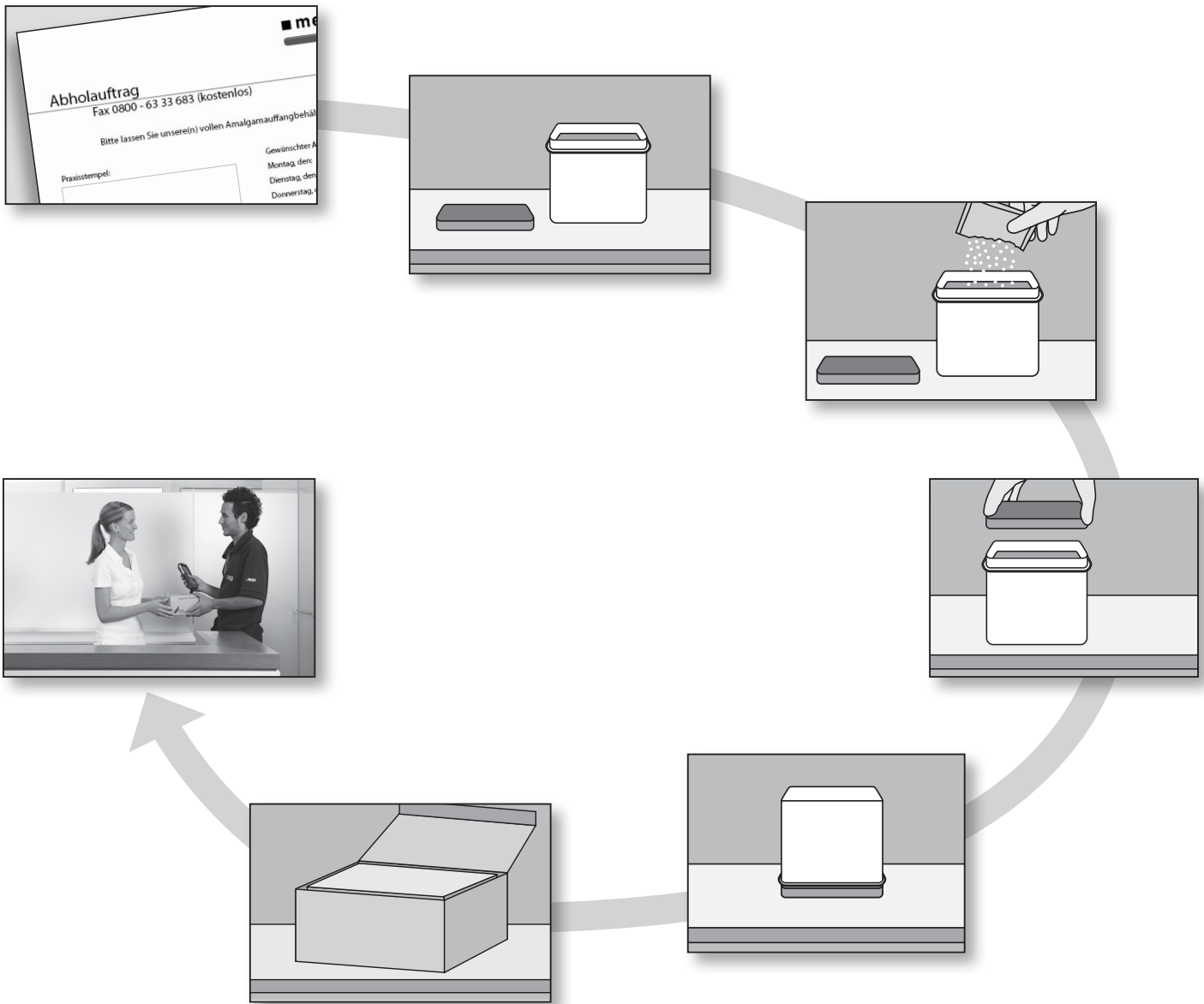

So funktioniert der medentex-Mehrweg:

Bitte rückseitiges Formular ausfüllen und kostenfrei an medentex faxen: 0800-6333683. Sobald Ihr Auftrag bei uns eingegangen ist, veranlassen wir die Abholung durch unseren Logistikdienstleister.

Bitte vor dem Wechsel des Amalgamabscheider-Behälters die Desinfektion gemäß Hersteller-Wartungsanweisung, Kapitel „Sauganlage“ durchführen.

Schutzkleidung anlegen. Amalgamabscheider-Behälter gemäß Hersteller-Wartungsanweisung ausbauen.

Aus Sicherheitsgründen bitte den gefüllten Amalgamabscheider-Behälter nach dem Ausbauen sofort mit dem dazugehörigen Deckel verschließen.

Dichtigkeitskontrolle durchführen und in die Transportverpackung legen. Der Versand des gefüllten Amalgamabscheider-Behälters darf nur in der Transportverpackung erfolgen. Sollten Sie keine Transportverpackung mehr besitzen, rufen Sie bitte vor der Abholung unsere kostenfreie Hotline an: 0800-1013758.

Bitte das Paket zum vereinbarten Termin bereitstellen, das Versandetikett bringt der Paketdienstfahrer mit.

Die Entsorgungsbestätigung und Ihren Austauschbehälter erhalten Sie anschließend mit der Post.

Bitte bewahren Sie die Transportverpackung des rückgelieferten Abscheider-Behälters auf.

Abholauftrag

Fax: 0800 - 63 33 683 (kostenlos)

Bitte lassen Sie unsere(n) vollen Amalgamabscheider-Behälter abholen.

Praxisstempel:

Gewünschter Abholtermin:

Montag, den: _____

Dienstag, den: _____

Donnerstag, den: _____

Bitte beachten Sie:

Sollten Sie mehrere Amalgamabscheider-Behälter schicken, verpacken Sie diese bitte zu einem Paket.

Rücklieferung:

Unsere(n) Behälter zurück*

Neuer Behälter

* Sie erhalten von medentex geleerte, gereinigte und desinfizierte Amalgamabscheider-Behälter in entsprechender Stückzahl zurück. Ausnahme Sirona-Rotoren: Diese können nicht recycelt werden.

Anschrift:

Telefon:

Fax:

E-Mail:

Öffnungszeiten
der Praxis:

Hiermit beauftragen wir (Praxis) die Firma medentex GmbH in Bielefeld als zugelassenen Entsorger, den beigefügten Amalgam-Abfall einer fachgerechten Verwertung zuzuführen.

Die Entsorgungsbestätigung wird mit der Rücksendung der gereinigten und überprüften Amalgamabscheider-Behälter an die Praxis geschickt. Die Entsorgungsbestätigung (oder eine Kopie) muss im Betriebsbuch des Amalgamabscheiders aufbewahrt werden.

Wir verwenden Ihre E-Mail-Adresse, um Sie zukünftig über Waren oder Dienstleistungen von uns zu informieren, die denen von Ihnen bestellten ähnlich sind. Sie können dieser Verwendung jederzeit widersprechen, ohne dass hierfür andere als die Übermittlungskosten nach Basistarif entstehen, z.B. per E-Mail an info@medentex.de.

Ort, Datum:

Unterschrift:
